

# SIEGE D'EVACUATION

Manuel d'utilisation

REHA-TRANS



# Siège d'évacuation

## Evacuation d'urgence



**Armoire de rangement**

# Introduction

Vous avez choisi d'acheter un SIEGE D'EVACUATION D'URGENCE.

Veillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec l'appareil, afin d'être prêt à intervenir lorsqu'une situation d'urgence se présente.

N'hésitez pas à répéter les essais et à faire une formation régulièrement.

Le SIEGE D'EVACUATION D'URGENCE a été développé pour les personnes qui se trouvent un moment donné en haut d'un escalier et ne peuvent pas descendre par leurs propres moyens, par exemple, des personnes handicapées, des personnes âgées, des non voyant, etc.

**Remarque:** Cet appareil ne monte pas les escaliers. Il n'est prévu que pour le transport de personnes. Il ne doit servir en aucun cas pour transporter d'autres charges

## • Type, numéro de série

- ⇒ Tous les appareils ont un numéro de série.
- ⇒ Merci d'indiquer ce numéro en cas de besoin.
- ⇒ Le numéro de série est mentionné sur le côté de l'appareil.
- ⇒ Veuillez noter dans le manuel d'utilisation le numéro de série et la date d'achat

Numéro de série			
Date d'achat :	année	mois	jour

## MESURES DE SÉCURITÉ


Pour la bonne utilisation du siège d'évacuation les mesures de sécurité sont réparties entre **AVERTISSEMENT** et **DANGER** suivant le cas.

<b>AVERTISSEMENT</b>	Le non-respect d'un « <b>Avertissement</b> » peut provoquer des accidents et nuire à la santé des personnes.
<b>DANGER</b>	Le non-respect d'un signe « <b>Danger</b> » peut provoquer des accidents et nuire à la santé des personnes ou endommager des objets.




### **Attention : conditions d'utilisation**

Assurez-vous que la place est suffisante pour tourner sur les paliers avec le SIEGE D'EVACUATION.

#### **Dimensions des paliers**

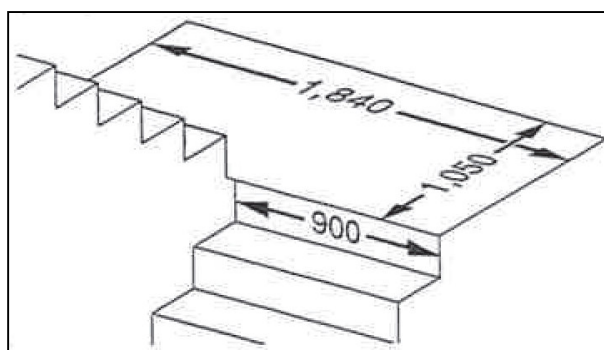

Le SIEGE D'EVACUATION ne fonctionne pas sur les escaliers tournant et de plus de 40° de pente.

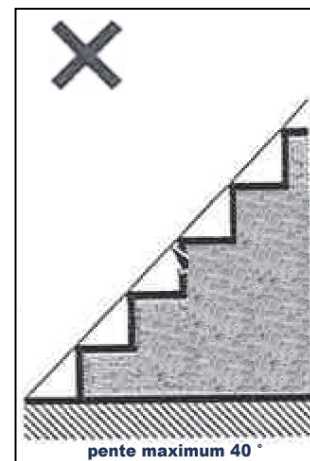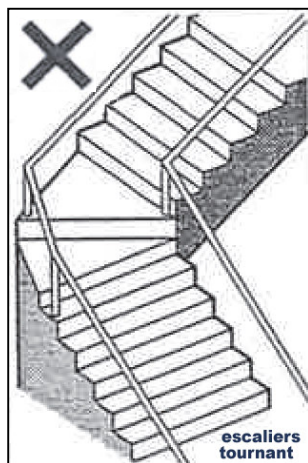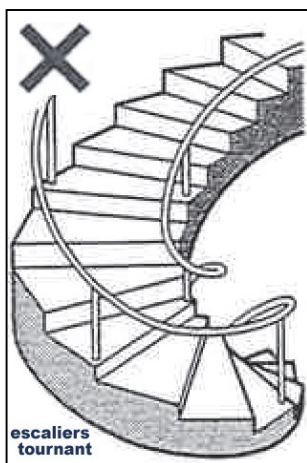

# 1 Informations de base pour une utilisation en toute sécurité

## 1 Vérifiez le siège d'évacuation avant chaque utilisation

L'utilisateur doit vérifier la chaise d'évacuation avant chaque usage. Cette vérification garantit une bonne utilisation.



## 2 Utilisation uniquement par du personnel ayant eu une formation



L'utilisateur doit être suffisamment formé. Assurez-vous que la formation a été faite.

Cet appareil ne peut que descendre les escaliers. Il a été conçu pour le transport de personnes. Aucune autre charge ne doit être transportée.

## 3. Installation sur l'escalier

N'utilisez jamais l'appareil sur un escalier de plus de 40° degré de pente, ni sur un escalier en colimaçon, ou sale, mouillé ou glissant.

L'appareil doit être perpendiculaire à l'escalier dès la première marche, sinon il peut basculer sur le côté et provoquer un accident.

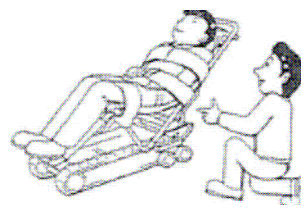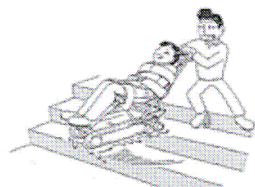

## 4 Arrêt de l'appareil

Si une difficulté se présente, ou si l'appareil était défectueux arrêtez de suite la descente.


Avec un appareil endommagé, vous risquez de provoquer un accident.



## 2 SPECIFICATIONS


Désignation	Siège d'évacuation d'urgence
Type	CD - 7 - 1
Charge utile	1 personne max. 135 kg
Poids	20 kg
Commande vitesse de descente	par vérin hydraulique
Frein sur chenilles	Frein à main dispositif d'homme mort
Longueur maxi	1310 mm ouvert 1100 mm plié
Largeur maxi	426 mm en fonction 426 mm plié
Hauteur maxi	810 mm en fonction 270 mm plié
Vitesse de descente (m / s)	1.1 (pour un passager de 65 kg)
Pente maximum	Escalier inclinaison maximale de 40 °

## 3 DESCRIPTION DES PIÈCES

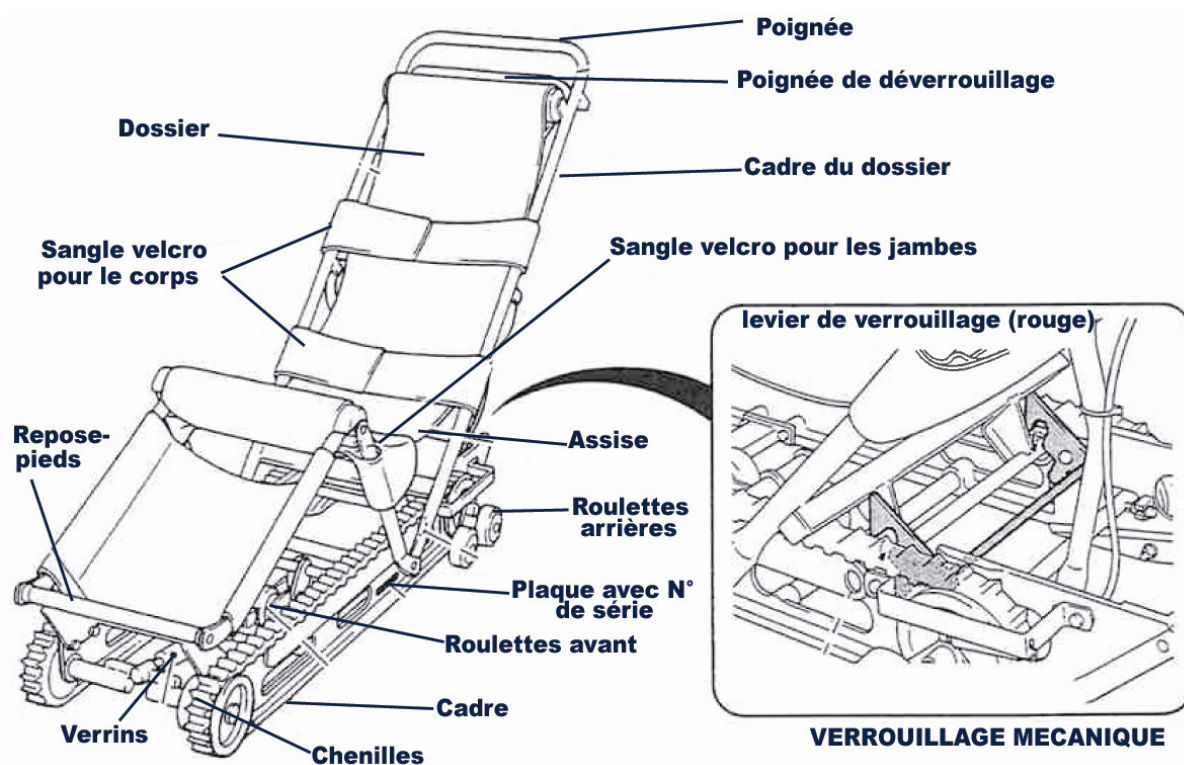

## 4 PREPARATION

- 1) Sortez l'appareil de son lieu de stockage ou de son armoire de rangement.
- 2) Tirez sur la poignée en même temps vers l'arrière et le haut jusqu'à l'enclenchement. Ce verrouillage est très bien perceptible (clic). Vérifiez sur le coté dans la fenêtre d'affichage que la couleur bleue apparaît. L'appareil est prêt.

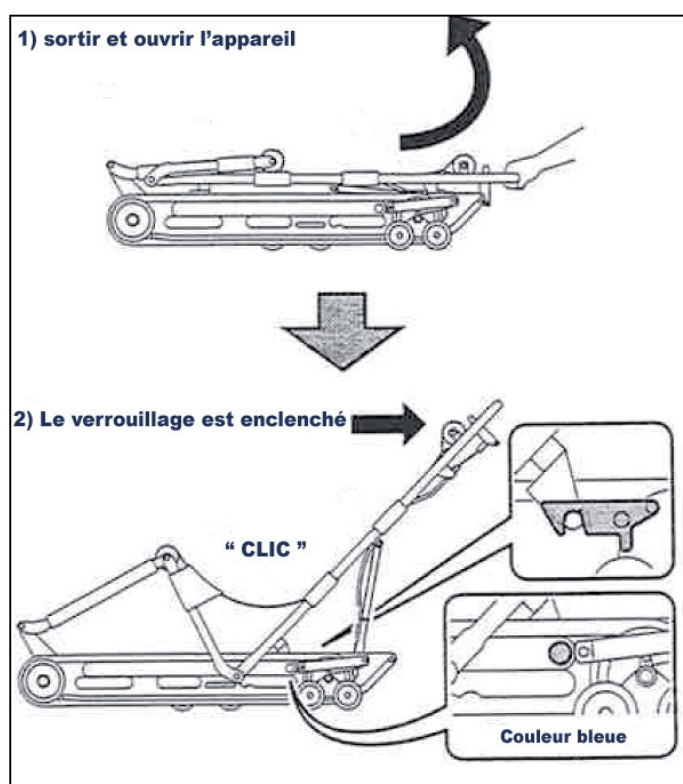

**DANGER**

Une utilisation sans le verrouillage est dangereux.  
Vérifiez toujours si l'appareil est bien verrouillé.


## 5 MISE EN PLACE DE LA PERSONNE

- 1) Placez l'appareil parallèlement au lit ou au fauteuil
- 2) Laissez l'appareil dans la même position jusqu'à la fin du chargement. Poser d'abord le bas du corps et les pieds sur le repose-pieds puis le haut du corps pour éviter le basculement de l'appareil.
- 3) Sanglez le passager sur le haut du corps et les pieds.




### AVERTISSEMENT

Procédez scrupuleusement dans l'ordre du chargement pour éviter tout basculement

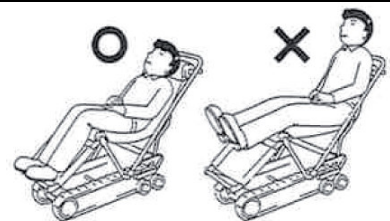

**Indication:** les bras doivent être maintenus sous les sangles.

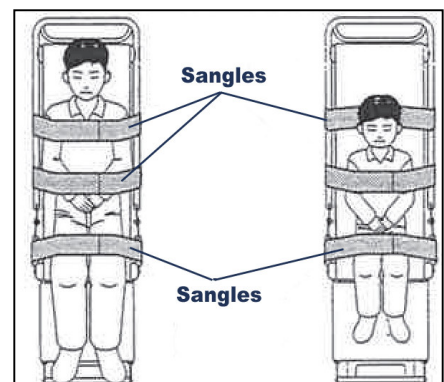

### DANGER

Une descente d'escalier sans que la personne soit bien sanglee peut faire provoquer la chute.




## 6 DEPLACEMENT SUR LE PALIER

1) Poussez l'appareil et maintenez la poignée de déverrouillage du frein. L'appareil se déplace sur ses six roues.

### **REMARQUE**

Pour faciliter le déplacement, il suffit de pousser légèrement la poignée vers le bas.

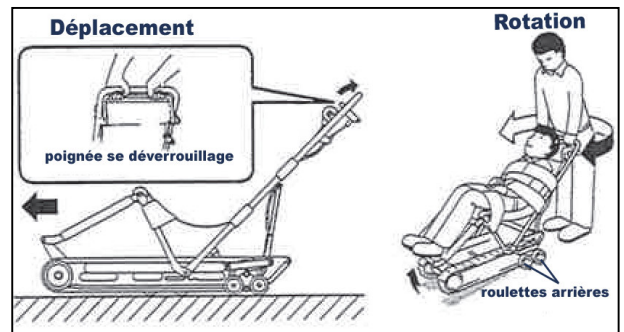

2) Pour tourner l'appareil, poussez la poignée vers le bas et vous tournez sur les roulettes arrières.

3) Si vous lâchez la poignée de déverrouillage du frein, l'appareil s'arrête automatiquement.

### **DANGER**


N'essayez pas de descendre un escalier, si les roues avant ne touchent pas le sol.

## 7 DESCENTE D'ESCALIER

1) Lorsque vous vous approchez du nez de la première marche du haut, réduisez la vitesse. N'oubliez pas que les roues sont en contact avec le sol.

### **DANGER**


Si les roulettes ne sont plus en contact avec le sol, lorsque l'appareil arrive au nez de marche, il est en équilibre et peut dévaler l'escalier.

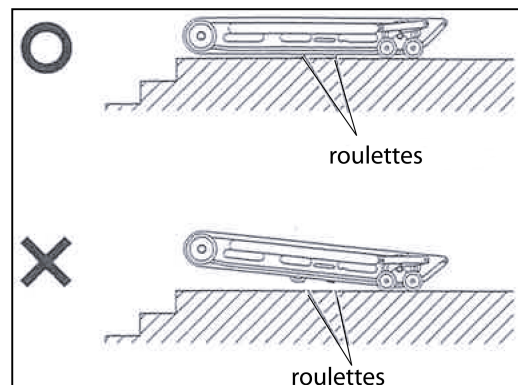

2) Avancez avec l'appareil vers l'escalier, et placez-le à angle droit avec la 1<sup>ère</sup> marche.

### **DANGER**

N'essayez jamais d'aborder l'escalier en biais. Ceci pourrait provoquer un accident grave.

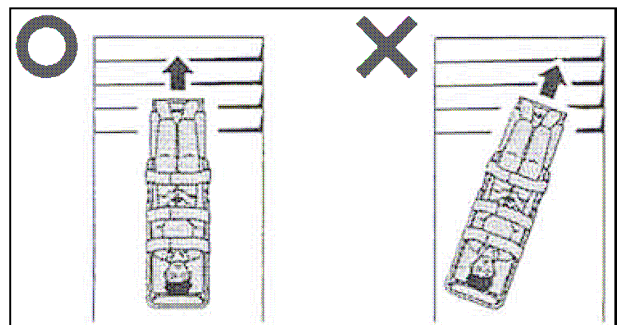

3) Lorsque les roulettes avant quittent le sol au nez de la première marche, l'appareil s'arrête automatiquement.

Lâchez la poignée/frein, ce qui bloque la chenille. Basculez l'appareil en avant vers l'escalier pour être en appui sur les marches.


**Indication** : N'appuyez pas sur la poignée/frein, aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt pour la descente.

4) La poignée/frein ne doit être actionnée que lorsque les chenilles caoutchouc sont en contact avec les marches. L'appareil descend par son propre poids. Ne lâchez jamais la poignée tant que l'appareil est sur l'escalier.

**Indication** : La vitesse de la descente est contrôlée par un vérin hydraulique.


5) Pour s'arrêter sur l'escalier, il suffit de lâcher la poignée/frein. Si vous devez vous éloigner de l'appareil, parce qu'il y a un obstacle, vérifiez que les chenilles reposent sur un minimum de 3 nez de marche, pour que l'appareil soit stable

6) Si vous tournez sur un palier, serrez la poignée/frein et tournez sur les roues arrières. Vérifiez que vous abordez la première marche à angle droit.

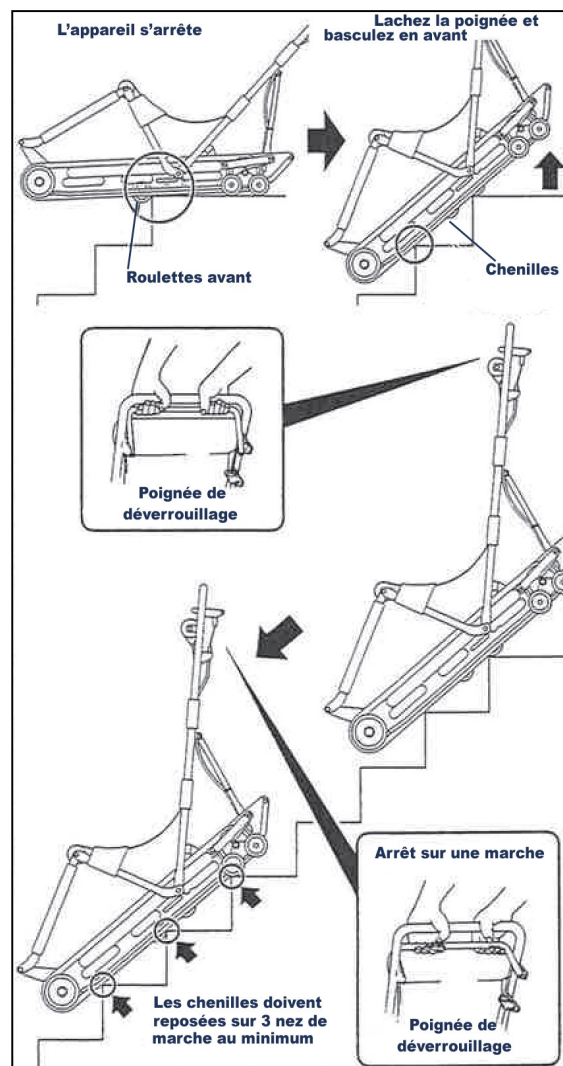

## AVERTISSEMENT

Quand les chenilles touchent le sol en bas de l'escalier, serrez la poignée/frein pour que les roulettes arrières touchent également le sol

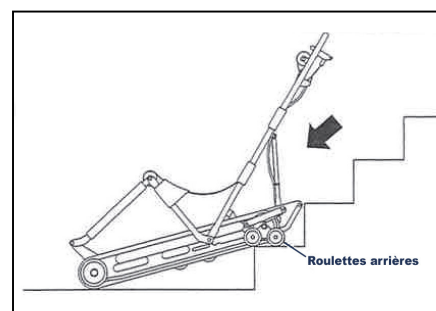

**DANGER**


N'essayez pas d'aborder un escalier si les roues avant ne sont pas en contact avec le sol.

## 8 STOCKAGE DE L'APPAREIL

1) Appuyez sur le levier de verrouillage qui se trouve derrière le dossier du siège et faites glisser le cadre du dossier vers l'avant jusqu'au verrouillage.

### **DANGER**

Le cadre se replie en ciseaux.  
Eloignez vos mains du mécanisme pour éviter un accident.

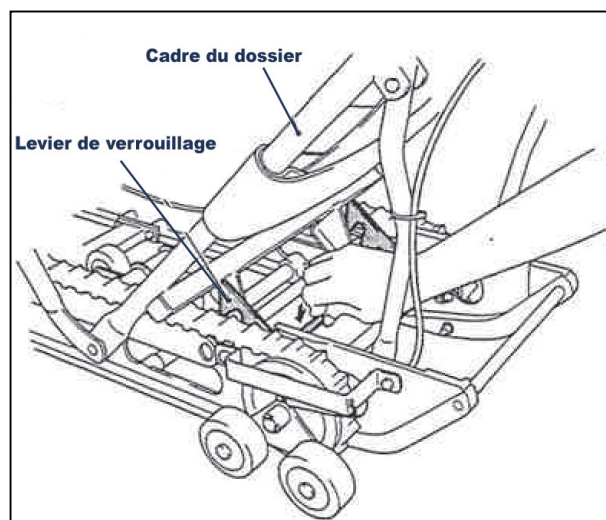

2) Stationnez l'appareil à un endroit facilement accessible par exemple : sous un lit ou dans une armoire.


## 9 ENTRETIEN ET CONSERVATION DE L'APPAREIL

### **CHENILLES CAOUTCHOUC**

- Enlevez les taches grasses qui pourraient s'y trouver.
- Vérifiez s'il n'y a pas de craquellements ou de fissures sur les chenilles. Si vous trouvez un défaut, remplacez les chenilles.

### **FREIN ET CÂBLE DE FREIN**

- Contrôlez que la poignée/frein fonctionne normalement, et que le frein fait son effet lorsque la poignée est lâchée.
- Vérifiez que le câble n'est pas abîmé. En cas de problème, changez le câble.

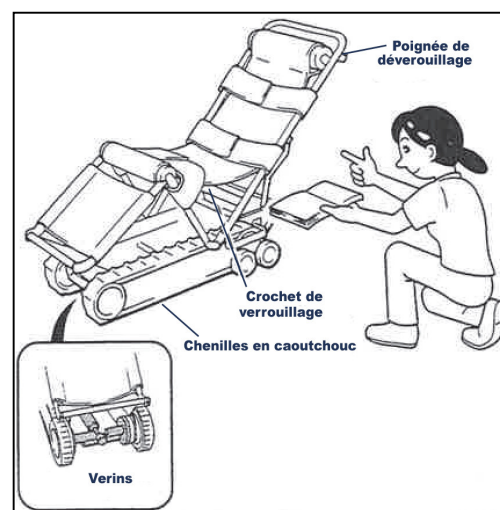

### **CROCHET DE VERROUILLAGE**

- Vérifiez que le verrouillage est bien en place et que le dossier ne peut pas se mettre pas en position de stockage.

### **VERINS**

- Vérifiez le vérin et son environnement (fuite d'huile)

# REHA-TRANS

**4 Rue des Forgerons  
68600 WOLFGANTZEN**

**Tél. : 03.89.79.17.77.  
Fax. : 03.89.79.19.24.**

**E-mail : [info@reha-trans.fr](mailto:info@reha-trans.fr)  
Site Internet : [www.reha-trans.fr](http://www.reha-trans.fr)**