SIEGE AUTO STARLIGHT SP

NOTICE D'UTILISATION





Cher utilisateur,

Le KIT pour Starlight est fait de nombreux composants pour une assise sûre, un maintien symétrique et accède à de nombreux besoins. Le KIT permet d'adapter le siège à des enfants avec un certain handicap.

Ceci est une notice d'utilisation complémentaire qui ne comporte que le montage et l'utilisation des accessoires du KIT. La notice principale reste la source première pour l'emploi du siège

Le Starlight est agréée pour les groupes 1 à 3 (9 à 36 kg). L'utilisation du siège du groupe 1 (9 à 18 kg) se différentie du groupe 2 et 3 (15 à 36 kg). Pour cette raison, nous développerons les accessoires par groupe d'âge.

Pour le groupe 1 nous avons la tablette, l'appui-tête complémentaire, les petits supports latéraux et la protection de la boucle.

Pour les groupes 2 et 3 nous avons la ceinture 5 points, la tablette, les cales de maintien au niveau des épaules et des cuisses ainsi que la protection de la boucle. Vous n'aurez l'utilité des accessoires après avoir réglé le siège comme indiqué dans la notice d'utilisation du siège.

Informations d'utilisation.

Nettoyage

Lors du contrôle régulier du siège, (tous les 3-6 mois) nettoyez les pièces de la façon suivante :

- Déhoussez les capitonnages
- ➤ Lavez les housses à 30°C maximum

Faites attention de ne pas laver les parties en mousse.

Pour les parties en skaï, nettoyez les avec un chiffon humide.

N'utilisez pas le siège sans capitonnage et dans le cas ou il faut le remplacer, utilisez le capitonnage d'origine.

Conseils aux parents

- Soyez un exemple pour vos enfants et bouclez la ceinture pour chaque trajet.
- Vérifiez que les passagers sont attachés.
- Ne poser rien sur la lunette arrière. Le déplacement d'objets sur la plage arrière en cas de choc peut provoquer de graves blessures.
- Vérifiez que tous les objets dans l'habitacle sont arrimés.
- Utilisez le verrouillage enfants s'il est disponible sur votre véhicule.

Attention : certaines pièces du siège peuvent donner des brûlures si le véhicule est stationné longtemps en plein soleil.

ACCESSOIRES


Capitonnage pour réduire la largeur au niveau des épaules

Maintien des épaules (petit modèle) groupe 1

Maintien des épaules (grand modèle) groupe 2 + 3

Les capitonnages d'épaule se glissent sur les cales comme un gant. Un élastique cousu dans l'ourlet les maintient.

Faites attention : les capitonnages doivent être tournés vers l'intérieur.

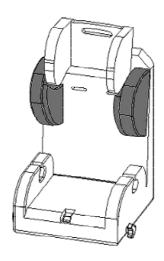


Protection de la boucle 5 points

Pour mettre en place la protection de la boucle, il faut ouvrir la boucle sortir la sangle centrale. Entrez la sangle centrale par la petite ouverture de la protection et remettez la sangle centrale en place.

Après fermeture de la boucle, on glisse la protection vers le haut et fermé par le bouton pression. Ainsi la protection ne peut donc plus glisser.

Pour ouvrir il faut déboutonner le bouton pression et glisser la protection vers le bas, ainsi le bouton rouge d'ouverture de la boucle est accessible.

Pour le montage de la protection pour le groupe 2 et 3, il y a lieu de monter la sangle de positionnement du 5 points.

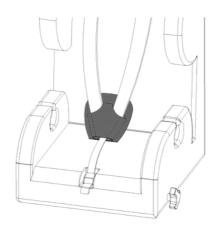

ACCESSOIRES Groupe 1


Tablette


Lors de la livraison de la tablette, des housses avec velcro sont fournies pour fixer la tablette sur les accoudoirs.

Glissez les housses sur les accoudoirs comme vous mettez un gant. Un élastique est cousu dans les housses pour les maintenir en place.

Assurez-vous que les coutures sont à l'intérieur.

Placez simplement la tablette sur les accoudoirs.

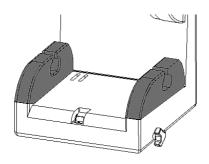

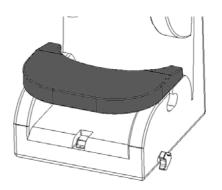

Capitonnage pour réduire la largeur au niveau de l'appui-tête

Passez les extrémités des sangles par les fentes des guides de sangle du harnais. Recouvrez les 2 oreilles gauches et droites de l'appui-tête ;

Pour finir, passez la sangle large par la poignée, tirez-la à fond et fixez la sur les sangles.



ACCESSOIRES Groupe 2 + 3

Capitonnage pour réduire la largeur d'assise


Pour mettre en place les coussinets guides des cuisses, il y a lieu de mettre en place les housses avec velcro.


Les housses avec velcro à mettre sur les accoudoirs sont fournies pour fixer les coussinets guides des cuisses.

Glissez les housses sur les accoudoirs comme vous mettez un gant. Un élastique est cousu dans les housses pour les maintenir en place.

Assurez-vous que les coutures sont à l'intérieur.

Vous pouvez maintenant mettre en place les coussinets à gauche et à droite.

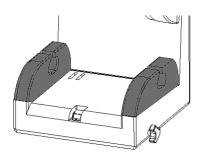

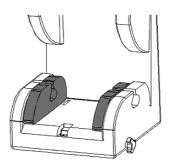


Repose pieds et sa fixation

Accrochez le receveur à l'avant et à l'arrière de la plaque de base et vissez-les deux pièces ensemble. Puis vissez la plaque d'angle vers l'avant.

Glissez le repose-pied par l'avant jusqu'au blocage. D'autres positions de réglages existent.

Le réglage en hauteur se fait suivant les trous de la plaque..

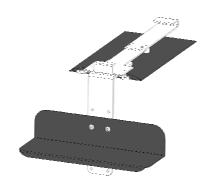

ACCESSOIRES Groupe 2 + 3


Base rotative avec receveur du repose-pied.

Glissez la base avec les parties recourbées gauche et droite sous et le long du châssis en passant sous le capitonnage (les guides de ceinture doivent rester visibles).

Vissez la base rotative au châssis, couchez le siège sur le dos et fixez la base pivotante au châssis. Vous pouvez maintenant visser les parties recourbées à la base pivotante.

La tôle courbe en forme de H doit être vissée à l'arrière de telle façon à pouvoir passer entre le siège et le dossier de la voiture et maintien la base pivotante. De même, vous fixez à l'avant les 2 tôles courbées à 90° de façon à coller à l'avant du siège de la voiture.


Ainsi vous pouvez pivoter le siège à 80°. Il se bloquera dans cette position.

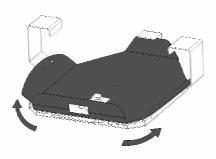



CHANGEMENT HARNAIS POUR GROUPE II ET III

- > Positionnez le siège sur le dossier
- Dehoussez l'avant du siège
- > Déclipsez la plaque plastique du dessous du siège, devissez la vis

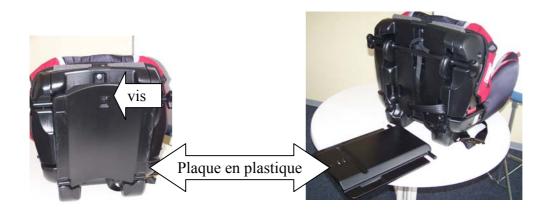

- > Remettre le siège en position assise
- ➤ Déclipsez la boucle plastique se trouvant à l'extrémité de la sangle au niveau du serrage central pour la libérer la sangle





> Sortez la sangle en appuyant sur le bouton du serrage central du harnais jusqu'à ce que la sangle sorte et simultanément avec la sangle en dessous du siège







➤ Prenez le petit bout de sangle <u>avec velcro</u> fourni avec le harnais



- Enfilez ce petit bout de sangle dans l'encoche (photo 1)
- > une fois passé, accrochez après ce petit bout l'autre sangle equipé d'une boucle métallique (photo 2)
- Faites glisser les 2 sangles accrochées à travers la boucle du serrage (photos 3 et 4)

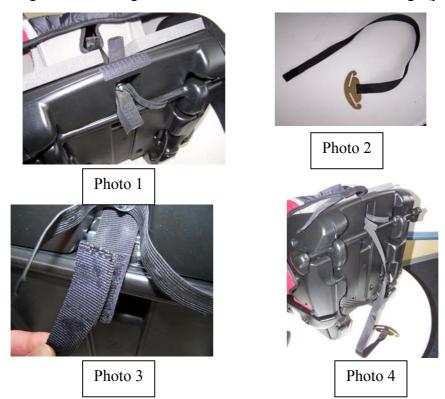

Libérez la boucle de sécurité (bouton pressoir rouge)
En dessous du siège sortez la pièce métallique où le harnais est attaché à travers l'encoche

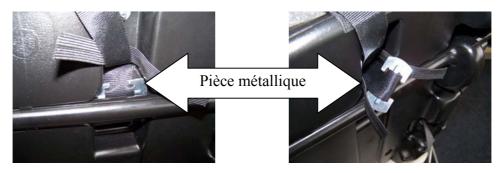

Sortez entièrement la sangle et enlever totalement la boucle de sécurité





Mise en place de la nouvelle boucle de sécurité :

Prenez le bout de sangle fourni



> enfilez à travers l'encoche de la ceinture, la sangle doit ressortir au niveau du bouton de serrage central





> enfilez l'extrémité dans la pièce en plastique noir fournie pour bloquer la sangle





Prenez la nouvelle boucle de sécurité et passez l'extrémité de la sangle dans la boucle, puis repassez l'extrémité dans la pièce en plastique noir





> Remettre la pièce métallique dans la sangle (sous le siège)






A l'arrière du siège se trouve une sangle fixée sur une pièce triangle

➤ Libérer la sangle des 2 côtés




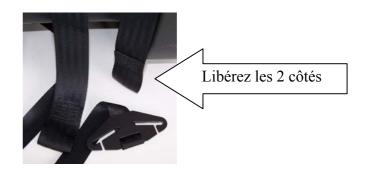

En haut du dossier enlevez les 2 côtés des sangles fixées sur la pièce métallique pour libérer les 2 bouts de sangle. Sortez ces 2 sangles à travers les encoches



De ce fait vous libérez les 2 sangles du harnais, enlevez complètement les 2 harnais

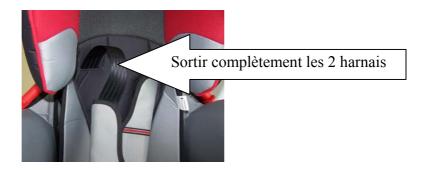

Prendre la nouvelle sangle

- ➤ Passez la nouvelle sangle à travers l'encoche de l'assise pour la faire ressortir sous le siège
- > puis l'autre extrémité dans l'autre encoche sous le siège pour récupérer les 2 bouts de sangles au niveau de l'assise










Enfilez de chaque coté dans la ceinture 5 points

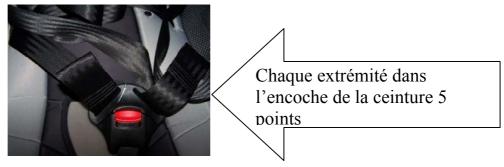

> puis passez chaque bout de sangle dans les encoches en haut du dossier,



Les 2 sangles ressortent derrière le siège



> fixer chaque extrémité dans la boucle métallique



➤ Vérifier que la sangle est bien positionnée et pas torsadée tout le long

> Couper le bout de la sangle au niveau du serrage central et fixé la boucle clip



Clipser la plaque en plastique et revissez la vis



CONSIGNES DE SECURITE

Utilisation

Le Reha KIT a été conçu pour des enfants souffrant d'un handicap. Lors de la conception d'un produit, nous tenons toujours des besoins spécifiques des patients. Le contrôle qualité garantie de répondre aux plus grandes exigences.

Sécurité

Avant chaque déplacement, vérifiez la bonne position des accessoires du KIT. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture. Une sangle desserrée ou boudinée ne fera pas bien son office. Vérifiez toujours que la sangle est bien en place et bien tendue. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux que nous proposons et qui ont été testés. Tout autre rajout suspendra la garantie.

En cas d'accident, il est indispensable de changer le siège auto ainsi que les accessoires.

Contrôle

Avant chaque utilisation, vérifiez le siège dans sa globalité notamment en ce qui concerne la position de la ceinture 3 points.

Protection des sièges de la voiture

En utilisant le siège auto avec le KIT, il n'est pas exclu une usure prématurée du siège de la voiture. Aussi, il est judicieux de protéger le siège. Cette usure ne peut en aucun cas ne nous être imputée.

Garantie

La garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Service après vente

Si une pièce de votre adaptation doit être échanger, adressez-vous à votre revendeur. Des modifications autres que celles du fabricant excluraient le siège de la garantie.

Le siège est breveté. Sous réserves de modifications visuelles et techniques

REHA-TRANS

4 Rue des Forgerons 68600 WOLFGANTZEN

Tél.: 03.89.79.17.77.

Fax.: 03.89.79.19.24.

E-mail: info@reha-trans.fr

Site Internet: www.reha-trans.fr