

## Notice d'utilisation du Siège Auto TIMY

Cher utilisateur,

Vous avez fait le bon choix en achetant le siège auto Timy. Nous espérons qu'il vous sera très utile et bien adapté à votre enfant.

Tous les sièges auto agréés sont spécialement adaptés à l'enfant auquel ils sont destinés par les différents réglages et accessoires. Si toutefois vous avez des remarques à formuler, adressez-vous à votre revendeur ou directement à notre société.



**ATTENTION :** Cette notice doit être lue par tous les utilisateurs et conservée pour les réglages futurs. Le bon usage, les bons réglages et l'entretien du siège Timy dépendent de la bonne information de l'utilisateur.

### **Utilisation :**

La conception du siège TIMY, avec ses accessoires, assure une bonne position assise symétrique. Les nombreux réglages et le capitonnage permettent une adaptation optimum.

Ce siège n'est prévu que pour une utilisation en voiture dans le sens de circulation conformément aux consignes de la norme ECE, avec fixation par la ceinture 3 points du véhicule. Les tests ont été réalisés pour un usage en Europe. Si vous désirez l'utiliser dans un autre pays, nous vous prions de nous le faire savoir.

L'utilisation sur le siège avant passager est possible, mais si le véhicule est équipé d'un airbag, le siège passager doit être reculé au maximum.

## SOMMAIRE

Avant-propos .....page 1

Sommaire .....page 2

Installation dans la voiture .....page 3

Déballage et réglage  
Hauteur du dossier  
Profondeur du siège  
Guide de ceinture

Réglages .....page 4

Timy Maxi  
Châssis  
Base pivotante  
Repose-pieds  
Tablette repose-bras

Informations et caractéristiques techniques .....page 6

Consignes de sécurité .....page 7

## Déballage et réglage

Déballer le siège ainsi que les accessoires. Poser le siège sur une surface plane et régler-le comme suit :

### Hauteur du dossier

La hauteur du dossier et de la sangle se règle par l'intermédiaire de l'appui-tête. Prenez une clé allène T2 de son support (1) et desserrez les vis (2) du dossier. Réglez l'appui-tête de façon à garder un espace d'un doigt entre les sangles d'épaules et l'épaule de l'enfant puis resserrez les vis.


### Profondeur du siège

La profondeur du siège se règle en dévissant les vis à ailettes sous l'assise. Le creux des genoux doit être à une distance de 2 doigts environ du rebord de l'assise.

### Guide de ceinture

Il est obligatoire de passer la ceinture 3 points du véhicule autour du siège Timy.

Dans le cas où la ceinture en diagonale ne passe pas au niveau de l'épaule de l'enfant mais au-dessus, le guide doit être réglé de façon à ce que la ceinture passe sur l'épaule (voir illustration). Pour régler le guide, utilisez la clé allène de 3 mm. Le guide est réglable dans tous les sens.

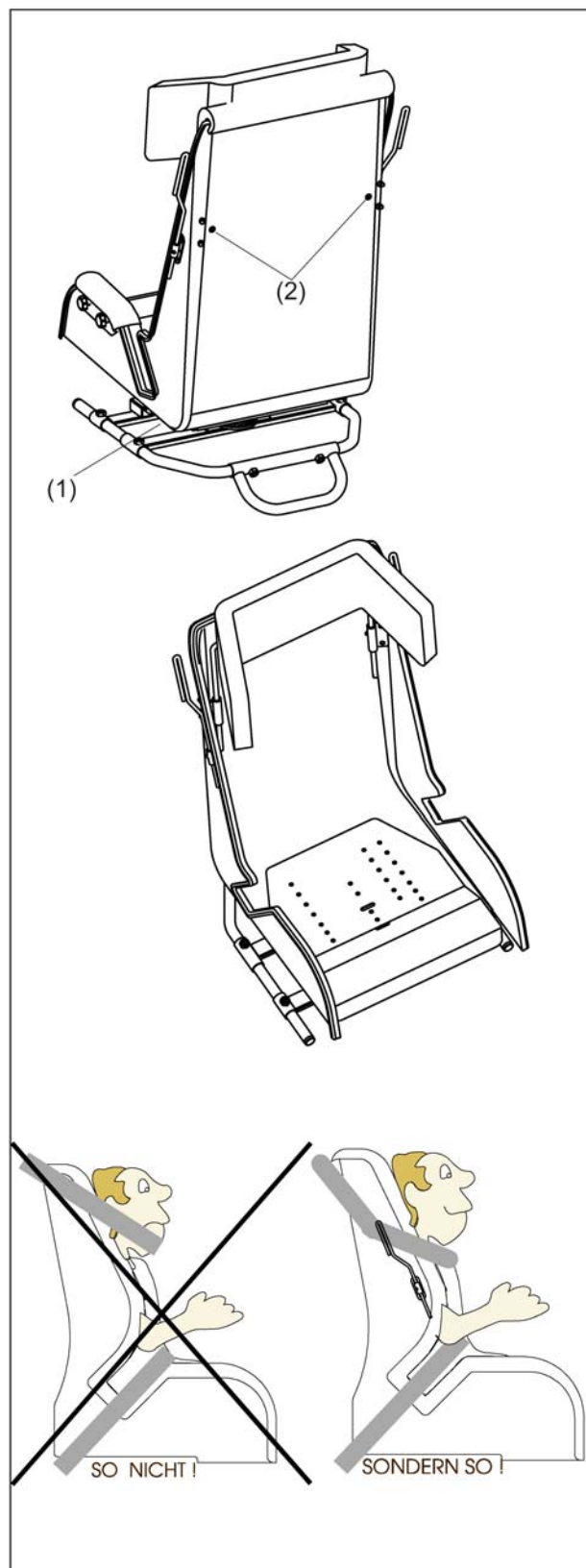

## **REGLAGES**

### **Timy Maxi**

Pour le Timy Maxi, le guide doit être mis du côté du passage de la ceinture et tourné de telle façon que la ceinture glisse bien dans l'anneau. Le guide doit être dévissé pour permettre le passage de la ceinture puis revissé.

### **Châssis**

Le siège auto Timy doit être installé en priorité sur le siège arrière droit de la voiture. Le siège équipé d'un adaptateur est posé sur le siège de la voiture et poussé contre le dossier de ce dernier. Le dossier du Timy doit faire corps avec le siège de la voiture.


La partie arrondie (1) sert à mieux maintenir le siège dans les virages et doit être glissée entre le siège et le dossier de la voiture. La partie arrondie est ensuite pivotée (vers le haut ou vers le bas) et fixée avec les 2 vis sans tête.


### **Châssis 300 120**

Ce châssis offre une grande stabilité et ne nécessite aucun réglage.

### **Châssis 300 130**

Le réglage horizontal se fait en desserrant les 4 vis sans tête et en glissant le siège dans la position recherchée. Le réglage de l'inclinaison se fait par coulissement des pièces avant avec la clé allène fournie. Vérifiez que les vis sont bien resserrées après réglage.

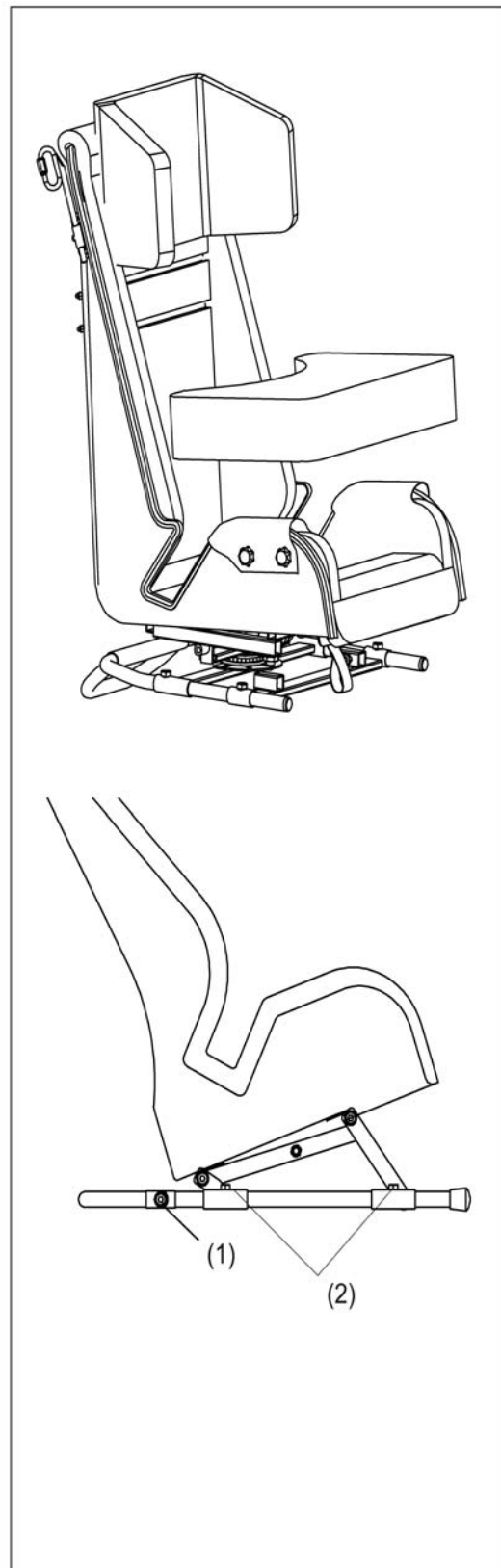

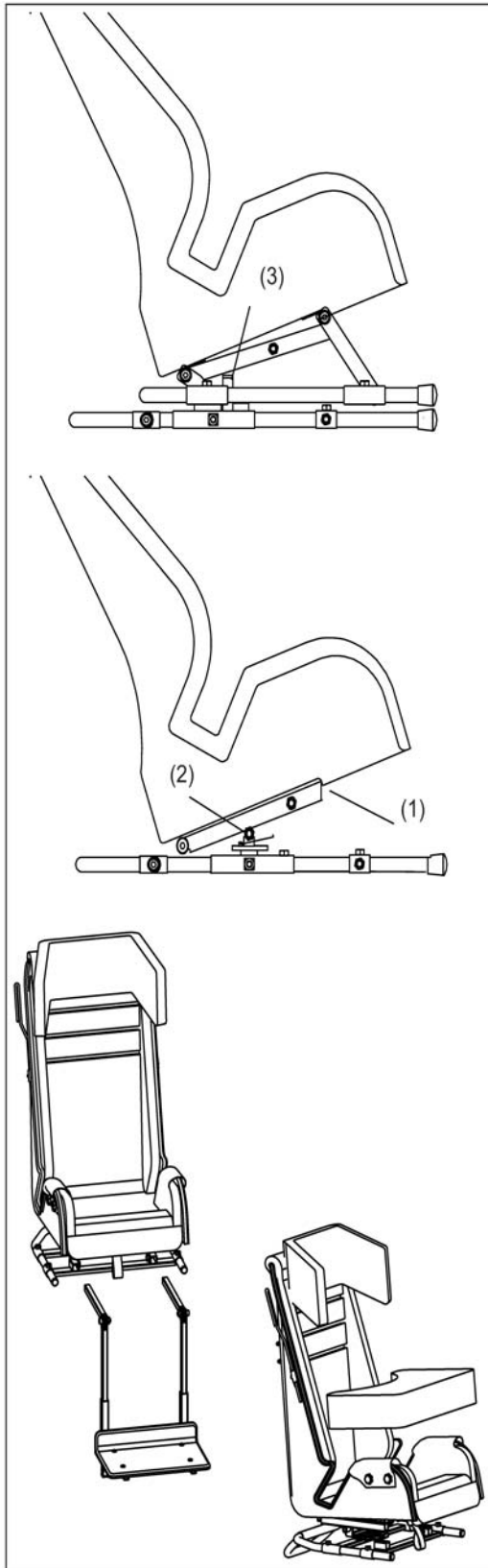

### **Base pivotante 300 131**

La base pivotante 300 131 est une adjonction au châssis 300 130 qui permet de sortir l'enfant face à la porte. La position est ainsi plus confortable pour attacher ou détacher l'enfant.

Pour pivoter, il faut baisser la manette (3). Lors du pivotement, le repose-pieds que nous vous proposons en option restera fixe et ne gênera pas la manœuvre.

### **Châssis « Light » 300 135**

Le châssis « Light » allie les fonctions d'inclinaison et de rotation dans une version simplifiée. Pour pivoter, il y a lieu de tirer sur la sangle rouge et de tourner le siège. Plusieurs positions de rotation sont prédéfinies.

Pour l'inclinaison du siège, vous utilisez la clef allène avec la rallonge que vous trouverez dans les bouchons du châssis. Desserrez la vis de réglage et mettez le siège dans la position recherchée. Resserrez la vis.

### **Repose-pieds 300 150**

Le repose-pieds se fixe au châssis. Il est réglable en hauteur, profondeur et inclinaison par des vis de serrage.

Dans le cas où celui ne conviendrait pas, il est possible d'en obtenir un sur mesures.

### **Tablette repose-bras 300 180**

La tablette, fixée par velcro sur les accoudoirs, permet à l'enfant de prendre appui et, en cas d'accident, elle amortira le choc.


## **Informations techniques**

### **Harnais 5 points de série**

Le harnais 5 points maintient la position de l'enfant au fond du siège auto Timy. Dans tous les cas, la ceinture de sécurité du véhicule doit être installée comme décrit précédemment.

La boucle de sécurité ne se ferme que si l'on respecte l'ordre d'assemblage, à savoir :

- mettre les 2 parties hautes ensemble
- insérer les 2 parties dans la boucle centrale

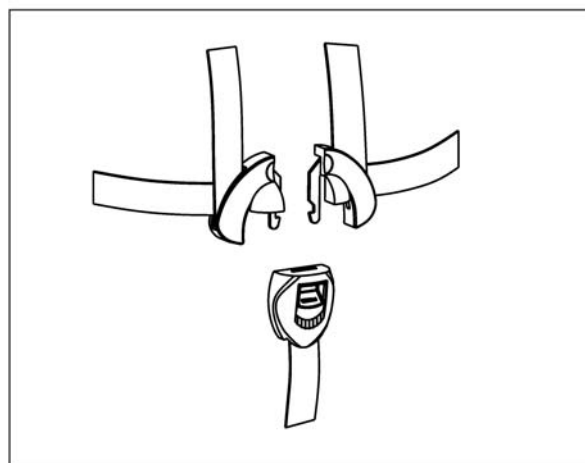

### **Caractéristiques Techniques :**

Siège auto	Junior	Timy	Senior	Maxi
Largeur	Jusqu'à 26 cm	Jusqu'à 31 cm	Jusqu'à 31 cm	Jusqu'à 36 cm
Profondeur	23 – 32 cm	32 – 40 cm	34 – 42 cm	36 – 46 cm
Hauteur de dossier	45 – 60 cm	50 – 65 cm	55 – 70 cm	60 – 80 cm
Poids maxi utilisateur	Jusqu'à 36 Kg	Jusqu'à 36 Kg	Jusqu'à 36 Kg	Jusqu'à 49 Kg
Taille maxi	Environ 125 cm	Environ 145 cm	Environ 155 cm	Environ 172 cm
Poids du siège	13 Kg	14 Kg	16 Kg	21 Kg

## **Consignes de sécurité**

**Utilisation** Le siège Timy est une aide technique et a été conçu pour les enfants handicapés. Lors de la conception, nous avons tenu compte des différents besoins de ces enfants. Un contrôle permanent vérifie que les exigences individuelles sont prises en compte.

**Sécurité** Après une semaine d'utilisation, il y a lieu de vérifier le serrage des vis et des différents réglages. C'est à vous de faire ce contrôle périodiquement tous les 3 ou 6 mois (Pensez également au nettoyage).  
Ne laissez jamais votre enfant seul dans la voiture sans surveillance.  
Une ceinture desserrée influe sur la fonction première du siège. Veillez à ce qu'elle soit toujours tendue et bien enclenchée.  
Ne faites aucune modification au siège.

**Réglage** Après chaque réglage, vérifiez le blocage des vis.

**Charge** Ne dépassez jamais la charge utile du siège.

**Nettoyage** Lors des contrôles périodiques, les parties suivantes doivent être nettoyées :  
- Nettoyez des pièces métalliques et plastiques avec l'aspirateur  
- Otez les housses et lavez-les à 30°.  
Attention : ne lavez pas les parties en mousse.

**Vérification** Avant la mise en place, vérifiez la bonne mise en place des housses, des accessoires et de la ceinture.

**Garantie** La garantie est de 12 mois à partir de la date d'achat.

**Pièces** En cas de besoin de pièces détachées adressez-vous à votre revendeur.  
Le remplacement ou l'ajout d'accessoires peuvent modifier les qualités du siège. N'utilisez que des pièces d'origine. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de ces conseils.

**Le siège est breveté.  
Sous réserve de  
modifications visuelles et  
techniques.**

# REHA TRANS

**4 Rue des Forgerons  
68600 WOLFGANTZEN**

**Tél. : 03.89.79.17.77.**

**Fax. : 03.89.79.19.24.**

**E-mail : [info@reha-trans.fr](mailto:info@reha-trans.fr)**

**Site Internet : [www.reha-trans.fr](http://www.reha-trans.fr)**